

Mask-A型使い捨てマスク



商品紹介：

製品の性能構造と構成:本製品はカバー体、鼻挟み、マスクテープで作られています。

製品の適用範囲及び用途:主に関係者の呼吸保護に用いられ、空気中の微粒子を濾過することができます。

使用説明:鼻に装着します。

特殊記憶条件と方法:相対湿度が80%を超えない腐食性ガスと通風の良い室内に保管し、高温を避けます。

有効期限:製造年月日より2年(シールに印刷有)

製品包装:平口PE袋(10個入り)/5袋入り/箱/50箱/カートン。

実行基準:EN149-2001。



操作紹介：

- (1) ノーズフィッタープリーツを伸ばし、マスクが立体になるように広げます。
- (2) マスクを顔に当てて、ノーズフィッターを鼻の形に合わせます。
- (3) マスクをあごのところに引いてください。すぐに立体呼吸空間が現れます。

ご注意事項：

- (1) 使い捨てに限り、使用後は廃棄します。
- (2) 包装が破損しましたら、使用禁止です。
- (3) 不織布アレルギーの方はご注意ください。
- (4) 使用前に使用説明を参照してください。



JMP01型マスクパートナー



ご使用方法：

- (1) どんな方にも適合し、長時間使用でも耳が痛くならない。
- (2) 名前記入可能、簡単に識別出来ます。
- (3) 二つ折り紙ピンセットとして使用可能、手触りによる汚染を軽減します。

連絡先：

日本科声株式会社
Japanese Science Acoustics Corporation

〒 177-0044 東京都練馬区上石神井一丁目13番4号富士ビップス 105号室
#105 Fuji-Vips, 1-13-4 Kamishakujii Nerima-Ku, Tokyo 177-0044, Japan
TEL:03-6331-0375 FAX:03-6331-0375
E-mail:ktanaka@jsacorp.co.jp URL: http://www.jsacorp.co.jp